

XIOGLICAN GEL 50 G

Marchio: XIOGLICAN
Codice Min.: 975524240
Link: [clicca qui per acquistare](#)



XIOGLICAN GEL Descrizione Dispositivo medico in gel per uso topico a base di galattosaminoglicano polisolfato, acido ialuronico ed altri componenti ad elevata attività idratante e lenitiva utile per il ripristino del fisiologico stato della pelle, anche nei casi in cui risulti alterata da patologie circolatorie periferiche o da edemi ed ematomi. Aiuta la prevenzione ed il trattamento locale delle alterazioni cutanee (distrofie, discromie, xerosi, desquamazione, secchezza), associate anche alla presenza di patologie venose (varici venose, flebiti e tromboflebiti superficiali) e l'idratazione della cute in tali

situazioni. **Trattamento locale** degli edemi e degli ematomi indotti da traumi e contusioni superficiali. **Modalità d'uso** Per aprire la prima volta il tubo, perforare la membrana protettiva utilizzando il perforatore contenuto nella parte superiore del tappo di chiusura. Applicare una quantità di gel idonea alla superficie da trattare e sulle zone circostanti, generalmente 4-6 cm di gel massaggiando delicatamente fino al suo completo assorbimento. Non utilizzare sulla cute lesionata. Per il trattamento di superfici estese aumentare la quantità di gel fino a 10-12 cm. Ripetere l'applicazione fino a 3 volte al giorno. Chiudere accuratamente il tubo dopo ogni utilizzo. Proseguire il trattamento sino alla scomparsa della sintomatologia riducendo progressivamente il numero di applicazioni giornaliere. Se la sintomatologia persiste o non si notano miglioramenti dopo 10 giorni di trattamento rivolgersi al medico o al farmacista. **Composizione** Galattosaminoglicano polisolfato, acido ialuronico sale sodico, alcool isopropilico, 1,2 propilenglicole, carbomero, isopropile miristato, sodio idrossido, essenza di lavanda, acqua purificata. **Avvertenze** Il prodotto è per uso esterno, utilizzare solo su cute integra, non va applicato in caso di sanguinamento, su ferite aperte e sulle mucose, nonché su sedi di infezioni in caso di processi suppurativi. Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia individuale ad uno o più componenti del prodotto. Xioglican Gel contiene glicole propilenico che può causare irritazione. L'uso prolungato dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; nel caso in cui tali fenomeni dovessero manifestarsi è indicato sospendere il trattamento e consultare il medico o il farmacista. In caso di gravidanza, di allattamento o di terapie topiche concomitanti l'impiego deve essere effettuato sotto il controllo del medico. Non usare il prodotto su bambini di età inferiore ai 14 anni. Tenere il prodotto lontano dalla vista e dalla portata dei bambini. Non utilizzare il dispositivo oltre la data di scadenza. Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso. In caso di necessità rivolgersi al medico o al farmacista. **Effetti indesiderati** Non sono prevedibili effetti indesiderati associati all'uso del prodotto. Eventuali effetti

indesiderati associati all'utilizzo del dispositivo vanno comunicati al medico o al farmacista. Conservazione Conservare a temperatura non superiore a 30°C. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. La data di scadenza è riportata sulla confezione. Validità post-apertura: 6 mesi. Formato Confezione da 50 g di gel in tubo di alluminio.